
	<h1>PROTOCOLES</h1> <h2>Les purges</h2>	Date création 01/04/2026
		Date application 01/04/2026
		Réf
		Version : 1.0

PURGE DE 5 MIN – TOUS LES MATINS

Avant la mise en route du fauteuil, il est impératif :

- de déclencher le système air-eau de la seringue multifonction et des cordons
- de purger le système d'eau du crachoir et du gobelet
- procéder à ces opérations **sans aucun instrument installé**

Pendant une durée d'au moins 5 minutes

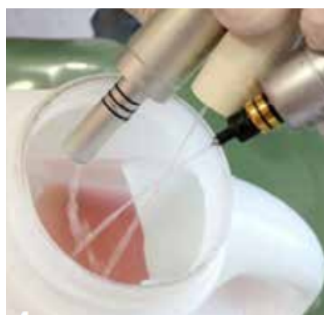

PURGE DE 20 à 30 SEC – ENTRE CHAQUE PATIENT

Purge des Porte-instruments dynamiques **de 20 à 30 secondes** entre chaque patient avec **l'instrumentation connectée**

Pendant une durée d'au moins 20 à 30 secondes



PURGE DE 20 à 30 SEC – EN FIN DE JOURNEE

Ces purges permettent de réduire transitoirement la concentration microbienne due à la prolifération des microorganismes pendant la période de non-utilisation de l'unit dentaire. Par contre, ces purges n'ont aucune action sur un biofilm déjà installé mais elles peuvent éviter la formation de nouveaux biofilms

SCM KOENIG

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable

PRECAUTIONS

Après quelques jours de non-utilisation, la prolifération des micro-organismes présents dans l'eau des units

fait que celle-ci ne respecte plus les critères de potabilité. La purge en début de séance permet d'éliminer l'eau impropre à l'utilisation lors des soins. Cette précaution doit absolument être respectée.

Cette purge doit être effectuée même si des dispositifs anti-reflux sont installés sur les units dentaires.