

ATM MAZAN	PROTOCOLES Référentiels utilisés	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

**1 SACHET + Moyen de stockage +
Lieu de stockage = 90 jours**

Omnipratique, chirurgie, orthodontie ...

**2 SACHETS + Moyen de stockage +
Lieu de stockage = 180 jours**

Chirurgie, implantologie ...

**Modifier si besoin dans e-stericode la durée de validité de
l'état stérile**

-> Paramètres
-> dispositifs
-> ligne par ligne

Durée de validité de l'état stérile

Une limite de validité tenant compte du type d'emballage, des lieux et moyens de stockage peut être déterminée en suivant les directives appliquées dans les hôpitaux de Belgique et des Pays-Bas. L'addition des points obtenus pour les différents modes de conditionnement et de conditions de stockage permet d'obtenir un total dont la correspondance à un délai de conservation de l'état stérile a été établie. Ce système de calcul est une aide qui détermine une durée de conservation maximum.

A - MODE DE CALCUL

Emballage primaire (unique ou premier emballage)

Papier crêpé (première épaisseur)	20
Feuille non-tissée	40
Sachet papier / papier	40
Sachet papier / plastique	80
Blister fermeture papier	80
Blister fermeture Tyvek®	100
Conteneur avec filtre ou soupape	100
Conteneur + Emballage interne non tissé	210

Deuxième emballage primaire (deuxième épaisseur)

Papier crêpé (deuxième épaisseur)	60
Feuille non-tissée	80
Sachet papier / papier	80
Sachet papier / plastique	100
Blister fermeture papier	100
Blister fermeture Tyvek®	120
Conteneur avec filtre ou soupape	250

Ce nombre de points ne s'applique pas si le premier emballage doit être présenté stérilement.

Emballage de transport (transport, stockage)

Sac en polyéthylène hermétiquement clos	400
Boucliers de protection (conteneurs)	250
Emballage de protection clos (bac, carton)	250

Les paragraphes suivants ne sont applicables que si l'on a obtenu plus de 50 points dans les paragraphes précédents.

Moyens de stockage

Chariot de soins	0
Etagère ou rayon ouvert	0
Armoire fermée (régulièrement entretenue)	100

Lieu de stockage

Couloir ou chambre de patient	0
Salle de soins	50
Magasin de matériel	75
Magasin de matériel stérile	250
Zone dite stérile (bloc opératoire)	300

B - BAREME

1-25 :	péremption	24 h
26-50 :	péremption	1 semaine
51-100 :	péremption	1 mois
101-200 :	péremption	2 mois
201-300 :	péremption	3 mois
301-400 :	péremption	6 mois
401-600 :	péremption	1 an
601-750 :	péremption	2 ans
751 et plus :	péremption	5 ans