

ATM MAZAN	PROTOCOLES Protocole d'utilisation de la vis de cicatrisation & Pilier Implantaire à usage unique	Date création
		01/02/26
		Date application
		01/02/26
		Réf
		Version : 1.0



VIS DE CICATRISATION / PILIER IMPLANTAIRE
PRECAUTIONS CONCERNANT LES PIÈCES PROTHÉTIQUES ET ANCILLAIRES DELIVRES NON STÉRILES <ul style="list-style-type: none"> Sauf indication contraire l'ancillaire et les parties prothétiques sont délivrés non stériles. Les pièces prothétiques sont à usage unique. Les ancillaires et pièces prothétiques fournis par Global D doivent être nettoyés avant stérilisation suivant les consignes décrites dans le paragraphe ci-après.
REGLES A SUIVRE POUR LE NETTOYAGE ET LA STÉRILISATION
<u>Préparation des dispositifs médicaux à la stérilisation en autoclave.</u> Dispositifs
Traitements des dispositifs médicaux neufs livrés non stériles <ul style="list-style-type: none"> Les dispositifs médicaux neufs livrés non-stériles par Global D ont été traités dans une chaîne de nettoyage qui élimine les traces ou résidus de fabrication. Toutefois, le praticien doit effectuer un nettoyage manuel renforcé par un nettoyage en laveur-désinfecteur avant toute stérilisation.

Règles à suivre
AVANT UTILISATION <ul style="list-style-type: none"> Après réception de la vis de cicatrisation dans son emballage d'origine La retirer pour un cycle dans le thermo désinfecteur, conditionnement (double ensachage), stérilisation Etiquetage Traçabilité
APRES UTILISATION <ul style="list-style-type: none"> Éliminer le DM dans la boîte OPCT
INTERDICTION FORMELLE DE LA RE-UTILISER

Dispositifs médicaux à usage unique

Ces dispositifs ne sont pas conçus pour être re-stérilisés. Leurs caractéristiques pourraient être altérées par une stérilisation à l'autoclave. Les dispositifs médicaux à usage unique (UU) peuvent appartenir aux DASRI ou aux OPCT