

<b>ATM MAZAN</b>	<b>GUIDE D'ENTRETIEN DE L'UNIT DENTAIRE</b>	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

### CHAQUE MATIN en début de vacation

- Purge du robinet d'eau chaude de la salle de soins **pendant 2 minutes minimum**
- **Si besoin mise en place du réservoir d'eau** indépendant le cas échéant. Le remplir en diluant le produit adéquat (biocide) avec l'eau distillée.
- **Ou Utiliser le système de désinfection intégré au fauteuil.**
- Mise en place du **filtre du système d'aspiration** nettoyé et désinfecté ou à usage unique
- Mise en place des **embouts d'aspiration** nettoyés et désinfectés.
- Rinçage de l'aspiration avec **1 litre d'eau** à l'aide OroCup®
- **Purge** du crachoir, des fouets et des sprays de l'unit **pendant 5 minutes sans P.I.D.**
- **Nettoyage-désinfection des surfaces en 1 temps** (*fauteuil, unit, scialytique, siège, plan de travail*)

### ENTRE CHAQUE PATIENT

- Rinçage de l'aspiration à l'eau (1 litre avec l'OroCup®) ou désinfection à l'OroCup® (2 bouchons pour 2 litres d'eau) en cas d'acte sanglant.
- Purge du crachoir, des sprays et des fouets de l'unit **20 à 30 secondes P.I.D. en place** puis déconnecter et traiter les P.I.D.
- Purge de la seringue air/eau (30 s)
- **Nettoyage/désinfection des surfaces en 1 temps** (lingette est préférée aux sprays, meilleure atteinte des surfaces et effet mécanique) (*fauteuil, unit, scialytique, siège, plan de travail*)
- **Aération de la salle de soin pendant 15 minutes à l'aide d'un épurateur d'air (équipé d'un filtre HEPA) au plus proche de la tête**

### CHAQUE SOIR En fin de vacation

- Nettoyage et désinfection de l'aspiration à l'OroCup®, avec l'OroCup® ( 2 bouchons / 2 litres d'eau)
- Purge du crachoir, des sprays et des fouets de l'unit après le dernier patient **20 à 30 secondes P.I.D. en place** puis déconnecter et traiter les P.I.D.
- Purge de la seringue air/eau (30 s)
- **Désinfection et nettoyage du filtre et des embouts du système d'aspiration**, ou changement du filtre à usage unique.
- **Nettoyage et désinfection des surfaces en 3 temps** (*fauteuil, unit, scialytique, siège, plan de travail*)
- **Rinçage et désinfection du réservoir d'eau indépendant et des embouts du système d'aspiration en laveur-désinfecteur à 55°C. Placer un réservoir propre et vide sur l'unit.**
- Monter le fauteuil, poser les pédales sur les côtés, éteindre le fauteuil
- **Aération de la salle de soin pendant 15 minutes à l'aide d'un épurateur d'air (équipé d'un filtre HEPA) au plus proche de la tête**

### CHAQUE SEMAINE

- Nettoyage des tubulures d'aspiration au MD555® (50ml de MD555® dans **950 ml** d'eau, aspirer et laisser agir **30 minutes minimum**, sans dépasser **2 heures**).