

<b>ATM MAZAN</b>	<b>PROTOCOLES</b>  <b>Dispositif de recapuchonnage</b>	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

**Une démarche de prévention des AES doit être mise en œuvre au cabinet**

Elle débute par le respect **des précautions standard**. Une définition adéquate des protocoles et l'utilisation de matériel de sécurité diminuent le risque d'AES



**Accessoire apportant sécurité et confort. La manipulation est simple : elle se fait d'une seule main, et évite tout contact des mains avec l'aiguille**

**Indications :**

- En fin d'anesthésie, le capuchon de l'aiguille est maintenu fermement dans le recapuchonneur
- Il suffit d'approcher la seringue avec l'aiguille et d'enfoncer celle-ci dans son capuchon
- La seringue peut être posée sur ce support et l'aiguille est ainsi protégée par son capuchon

**Propriétés :**

- Le recapuchonneur lourd et très stable garantit un parfait équilibre de l'ensemble
- Le blocage et le déblocage du capuchon dans le recapuchonneur se font par simple pression sur le bouton
- S'utilise avec toutes les marques de seringues et d'aiguilles
- **Stérilisable en autoclave à 135°C**