


ATM MAZAN	PROTOCOLES Le retraitement des porte-instruments dynamiques	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

Circuit des PID

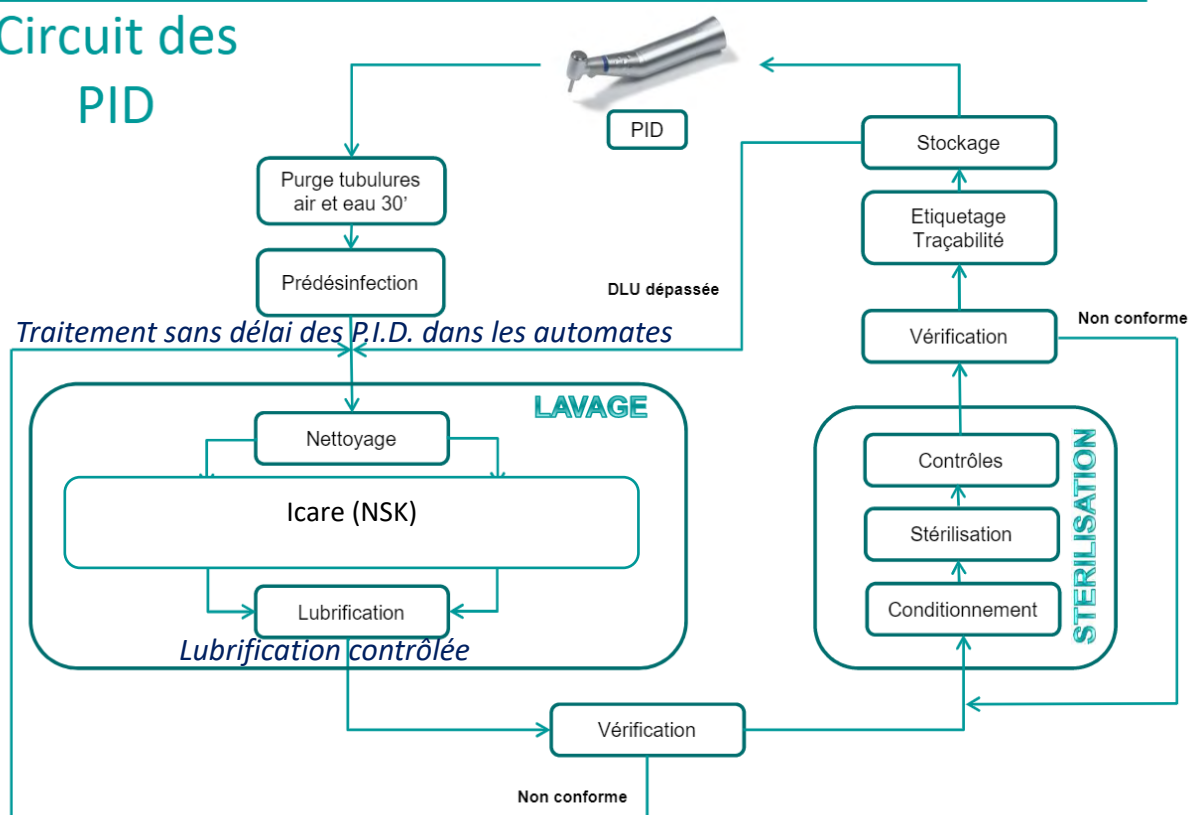

Pour la prise en charge de l'instrumentation dynamique il convient de respecter les étapes suivantes :

- Désadapter l'**outil de coupe** de l'instrument dynamique
- Laisser celui-ci raccordé au **cordon** d'alimentation
- Saisir le P.I.D. avec **une lingette détergente-désinfectante**
- **Purger** les conduits d'air et d'eau pendant au **moins 30 secondes**
- **Déconnecter** l'instrument dynamique de son support
- **Conserver** le P.I.D. dans la **lingette** pour se rendre à la salle de stérilisation
- Placer le P.I.D. **sans délai** dans l'automate laveur désinfecteur de PID +
- Utiliser la « **petite goutte** » sur l'Icare + pour une lubrification contrôlée
- **Ensacher** le PID
- **Stériliser** l'instrument dynamique dans un **cycle prion** avec les autres dispositifs médicaux