

<b>ATM MAZAN</b>	<b>PROTOCOLES</b>  <b>Les purges</b>	Date création 01/102/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

### PURGE DE 5 MIN – TOUS LES MATINS

Avant la mise en route du fauteuil, il est impératif :

- de déclencher le système air-eau de la seringue multifonction et des cordons
- de purger le système d'eau du crachoir et du gobelet
- procéder à ces opérations **sans aucun instrument installé**

Pendant une durée d'au moins 5 minutes



### PURGE DE 20 à 30 SEC – ENTRE CHAQUE PATIENT

Purge des Porte-instruments dynamiques **de 20 à 30 secondes** entre chaque patient avec **l'instrumentation connectée**

Pendant une durée d'au moins 20 à 30 secondes



### PURGE DE 20 à 30 SEC – EN FIN DE JOURNEE

Ces purges permettent de réduire transitoirement la concentration microbienne due à la prolifération des microorganismes pendant la période de non-utilisation de l'unit dentaire. Par contre, ces purges n'ont aucune action sur un biofilm déjà installé mais elles peuvent éviter la formation de nouveaux biofilms

### PRECAUTIONS

Après quelques jours de non-utilisation, la prolifération des micro-organismes présents dans l'eau des units

fait que celle-ci ne respecte plus les critères de potabilité. La purge en début de séance permet d'éliminer l'eau impropre à l'utilisation lors des soins. Cette précaution doit absolument être respectée.

Cette purge doit être effectuée même si des dispositifs anti-reflux sont installés sur les units dentaires.