

|                            |   |                                     |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>ATM</b><br><b>MAZAN</b> | <b>PROTOCOLES</b><br>Protocole d'utilisation de la vis de cicatrisation, pilier implantaire, transfert à usage unique | <i>Date création</i><br>01/02/26    |
|                            |   | <i>Date application</i><br>01/02/26 |
|                            |   | <i>Réf</i>                          |
|                            |   | <i>Version : 1.0</i>                |



| VIS CICATRISATION / PILIER IMPLANTAIRE   |
|--|
| <b>PRECAUTIONS CONCERNANT LES PIÈCES PROTHÉTIQUES ET ANCILLAIRES DELIVRES NON STÉRILES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sauf indication contraire l'ancillaire et les parties prothétiques sont délivrés non stériles.</li> <li>Les pièces prothétiques sont à usage unique.</li> <li>Les ancillaires et pièces prothétiques fournis par Global D doivent être nettoyés avant stérilisation suivant les consignes décrites dans le paragraphe ci-après.</li> </ul> |
| <b>REGLES A SUIVRE POUR LE NETTOYAGE ET LA STÉRILISATION</b>   |
| <u>Préparation des dispositifs médicaux à la stérilisation en autoclave.</u><br><b>Dispositifs</b>   |
| <b>Traitements des dispositifs médicaux neufs livrés non stériles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les dispositifs médicaux neufs livrés non-stériles par Global D ont été traités dans une chaîne de nettoyage qui élimine les traces ou résidus de fabrication.</li> <li>Toutefois, le praticien doit effectuer un nettoyage manuel renforcé par un nettoyage en laveur-désinfecteur avant toute stérilisation.</li> </ul>                                       |

| Règles à suivre  |
|--|
| <b>AVANT UTILISATION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Après réception de la vis de cicatrisation dans son emballage d'origine</li> <li>La retirer pour un cycle dans le thermo désinfecteur, conditionnement (double ensachage), stérilisation</li> <li>Étiquetage</li> <li>Traçabilité</li> </ul> |
| <b>APRES UTILISATION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer la vis dans la boîte OPCT</li> </ul>  |
| <b>INTERDICTION FORMELLE DE LA RE-UTILISER</b>   |

## Dispositifs médicaux à usage unique

Ces dispositifs ne sont pas conçus pour être re-stérilisés. Leurs caractéristiques pourraient être altérées par une stérilisation à l'autoclave. Les dispositifs médicaux à usage unique (UU) peuvent appartenir aux DASRI ou aux OPCT