

ATM MAZAN	PROTOCOLES Les modalités de préparation des dilutions et d'emploi des produits utilisés	<i>Date création</i> 01/02/26
		<i>Date application</i> 01/02/26
		<i>Réf</i>
		<i>Version : 1.0</i>

PRODUIT : A COMPLETER

1	2	3	4

PRODUIT : A COMPLETER

1	2	3	4	5

Les notices des produits et leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS) doivent être conservées.
Les FDS doivent en plus être transmises au médecin du travail.

ATM MAZAN	PROTOCOLES Les modalités de préparation des dilutions et d'emploi des produits utilisés	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

MD 550

Détergent pour crachoirs	Le soir avant la désinfection du système d'aspiration	Appliquer quelques jets de MD 550 dans le crachoir et répartir avec une brosse en exerçant une pression homogène	La durée d'action est de 2 minutes	Prêt à l'emploi
MD 550 est utilisé de manière non diluée. Appliquer quelques jets de MD 550 dans le crachoir et répartir avec une brosse en exerçant une pression homogène. Laisser MD 550 agir brièvement et rincer à l'eau. La durée d'action est de 2 minutes. Utiliser MD 550 le soir, selon les besoins, mais impérativement avant la désinfection du système d'aspiration.				

Substances actives : alcools EN 13727, EN 13624, EN 14348

Disponible en : flacon 750 ml

OROTOL PLUS

Surfaces à traiter	DM/Fréquence	ml / produit	litre / eau	% Dilution
Entretien des systèmes d'aspiration	Après le dernier patient à la fin de journée ou 2 fois par jour (midi et soir) en cas d'activité soutenue	Préparer 2 litres de solution Orotol plus à 2%		(dilué à 2%)
		40 2 bouchons	2	
1 Avant le nettoyage aspirer 2 litres d'eau	3 Aspirez 1 litre de solution par unité de soins en utilisant l'Orocup	4 Désinfecter le crachoir (au moins 250 ml de solution par crachoir)	5 Laisser agir pendant la nuit (minimum 1 heure)	6 Le matin suivant après la remise en service aspirez 2 litres d'eau froide

ATM MAZAN	PROTOCOLES Les modalités de préparation des dilutions et d'emploi des produits utilisés	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

MD555 CLEANER

Surfaces à traiter	DM/Fréquence	ml / produit	litre / eau	% Dilution
Entretien des systèmes d'aspiration	Après le dernier patient à la fin de journée ou 2 fois par jour (midi et soir) en cas d'activité soutenue	Préparer 2 litres de solution MD 555 à 5%		(dilué à 5%)
		100 5 bouchons	2 2	
1 Avant le nettoyage aspirer 2 litres d'eau	3 Aspirez 1 litre de solution par unité de soins en utilisant l'Orocup	4 Désinfecter le crachoir (au moins 250 ml de solution par crachoir)	5 Laisser agir pendant la pause du déjeuner (30 min minimum à 2h maximum)	6 Après la pause aspirez 2 litres d'eau

Les notices des produits et leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS) doivent être conservées.
Les FDS doivent en plus être transmises au médecin du travail.