

ATM MAZAN	PROTOCOLES Traitement DM en fin de journée Traitement DM neuf et retour SAV	Date création 01/02/26
		Date application 01/02/26
		Réf
		Version : 1.0

DANS LES CAS PARTICULIERS OU, EN FIN DE JOURNEE, CERTAINS DISPOSITIFS MEDICAUX N'ONT PAS ETE TRAITES, APPLIQUER CETTE METHODE :

JUSTIFICATION DE LA QUESTION

LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES NE DOIVENT PAS SECHER SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX AVANT D'ETRE TREMPES.

1

Le soir

LAISSER **TREMPER 15 MINUTES** DANS UNE SOLUTION DE PRE-DESINFECTION, PUIS LAISSER DANS UN **BAC AVEC COUVERCLE D'EAU DEMINERALISEE** TOUTE LA NUIT

2

Le lendemain
Matin

REPRENDRE AU NIVEAU DE LA PRE-DESINFECTION LE LENDEMAIN AFIN DE REALISER LE PROTOCOLE DE LA CHAINE DE STERILISATION SANS INTERRUPTION

TOUT DISPOSITIF MEDICAL REUTILISABLE NEUF (OU DE RETOUR D'ENTRETIEN) EST NETTOYE AVANT QU'IL SOIT PROCEDE A SA PREMIERE STERILISATION

JUSTIFICATION DE LA QUESTION

LES DISPOSITIFS MEDICAUX NEUFS OU REPARES SONT RECOUVERTS D'UNE COUCHE D'HUILE QU'IL FAUT IMPERATIVEMENT ELIMINER AVANT DE REALISER LA STERILISATION. SINON, CELLE-CI NE SERAIT PAS EFFICACE.

1

IL EST NECESSAIRE DE **NETTOYER UN INSTRUMENT NEUF DANS LE THERMO-DESINFECTEUR** AVANT DE PROCEDER A SA PREMIERE STERILISATION OU A SA PREMIERE DESINFECTION

2

LES FRAISES ET FORETS QUI NE SONT PAS LIVRES SOUS EMBALLAGE STERILE DOIVENT AUSSI ETRE **NETTOYES AVANT LA PREMIERE STERILISATION**

3

CONTROLLER MINUTIEUSEMENT LE RESULTAT APRES LE CYCLE EN THERMO-DESINFECTEUR

PROCEDER, SI NECESSAIRE **UN SECOND CYCLE** EN MACHINE POUR UN RESULTAT PARFAIT

LE NETTOYAGE DOIT ETRE PARTICULIEREMENT ATTENTIF, CAR L'HUILE DE COUPE EST TRES DIFFICILE A RETIRER DE LA SURFACE DES INSTRUMENTS USINES

CABINET DENTAIRE ATM MAZAN

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable