

	PROTOCOLES	
	Protocole d'utilisation de la vis de cicatrisation, pilier implantaire, transfert à usage unique	Date création 01/04/26
		Date application 01/04/26
		Réf Version : 1.0



VIS CICATRISATION / PILIER IMPLANTAIRE
<p>PRECAUTIONS CONCERNANT LES PIÈCES PROTHÉTIQUES ET ANCILLAIRES DELIVRES NON STÉRILES</p> <ul style="list-style-type: none"> Sauf indication contraire l'ancillaire et les parties prothétiques sont délivrés non stériles. Les pièces prothétiques sont à usage unique. Les ancillaires et pièces prothétiques fournis par Global D doivent être nettoyés avant stérilisation suivant les consignes décrites dans le paragraphe ci-après. <p>RÈGLES À SUIVRE POUR LE NETTOYAGE ET LA STÉRILISATION</p> <p><u>Préparation des dispositifs médicaux à la stérilisation en autoclave.</u></p> <p>Dispositifs</p> <p>Traitements des dispositifs médicaux neufs livrés non stériles</p> <ul style="list-style-type: none"> Les dispositifs médicaux neufs livrés non-stériles par Global D ont été traités dans une chaîne de nettoyage qui élimine les traces ou résidus de fabrication. Toutefois, le praticien doit effectuer un nettoyage manuel renforcé par un nettoyage en laveur-désinfecteur avant toute stérilisation.

Règles à suivre
<p>AVANT UTILISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Après réception de la vis de cicatrisation dans son emballage d'origine La retirer pour un cycle dans le thermo désinfecteur, conditionnement (double ensachage), stérilisation Étiquetage Traçabilité <p>APRES UTILISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Éliminer la vis dans la boîte OPCT <p>INTERDICTION FORMELLE DE LA RE-UTILISER</p>

Dispositifs médicaux à usage unique

Ces dispositifs ne sont pas conçus pour être re-stérilisés. Leurs caractéristiques pourraient être altérées par une stérilisation à l'autoclave. Les dispositifs médicaux à usage unique (UU) peuvent appartenir aux DASRI ou aux OPCT