

Traçabilité de l'entretien des surfaces, des purges, de l'aspiration et de l'unit en salle de soins

NOM:	CABINET:	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
① M A T I N en début de vacation							
- Purger le robinet de la salle de soins 2 mn minimum							
- Mettre les filtres et les embouts d'aspiration en place							
- Rincer l'aspiration (1L d'eau dans l'OroCup)							
- Purger 5 mn (les cordons sans PID)							
- Nettoyer désinfecter les surfaces (Fauteuil, unit, tablette, scialytique, siège, plan de travail) en 1 temps							
Assistant(e)							
② ENTRE LES PATIENTS							
- Rincer l'aspiration (1L d'eau dans l'OroCup) si acte sanglant rajouter de l'Orotol							
- PID en place, purge de 30s sans l'outil de coupe puis déconnexion							
- Purge de la seringue air/eau (30s)							
- Nettoyer désinfecter les surfaces (Fauteuil, unit, tablette, scialytique, siège, plan de travail) en 1 temps							
- Aération de la salle de soin pendant 15 minutes à l'aide d'un épurateur d'air (équipé d'un filtre HEPA) disposé au plus proche de la tête.							
③ S O I R en fin de vacation							
- Passer Orotol avec l'OroCup dans les aspirations (1 bouchon/1L d'eau)							
- PID en place, purge de 30s sans l'outil de coupe puis déconnexion							
- Purge de la seringue air/eau (30s)							
- Désinfection des filtres d'aspiration							
- Nettoyer désinfecter les surfaces (Fauteuil, unit, tablette, scialytique, siège, plan de travail) en 3 temps							
- Aération de la salle de soin pendant 15 minutes à l'aide d'un épurateur d'air (équipé d'un filtre HEPA) disposé au plus proche de la tête.							
- Monter le fauteuil, poser les pédales sur les côtés, éteindre le fauteuil							
Assistant(e)							
④ CHAQUE SEMAINE							
Nettoyage au MD555							