



PROTOCOLES

Les tests de Routine

Date création

01/03/26


Date application

01/03/26

Réf :

Version : 1.0

Test de routine	Fréquence
LE TEST DE VIDE	TOUS LES MATINS

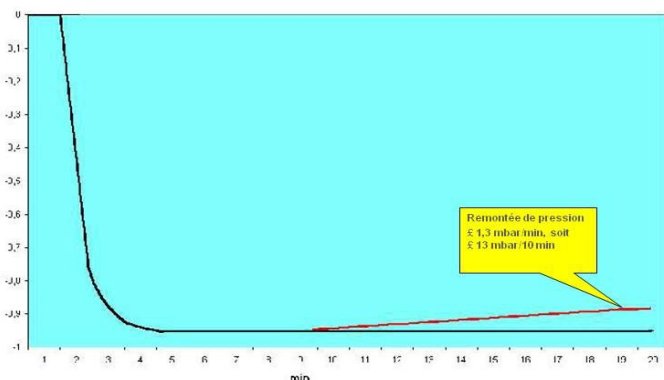

- Tous les matins
- Si test défaillant : peut signifier que le joint de porte n'est plus étanche
- Il doit être nettoyé ou changé
- Dans ce cas : ne pas effectuer le test hélix

Si le test de vide est défaillant, le **lancer une seconde fois** -> si test correct : démarrer les cycles de la journée

-> si test incorrect : Appeler le S.A.V.

Test de routine	Fréquence
LE TEST HELIX (134°C 3,5 mn)	AVANT LE PREMIER CYCLE



134°C 3,5 min test Hélix

STEAM

- Tous les matins **avant** le premier cycle
- Le test hélix doit être **ensaché** et placé au **centre de la cuve**
- **Contrôler** et **valider** le papier vireur avant de démarrer le premier cycle de la journée
- **Traçabilité**

Test de routine	Fréquence
LE TEST HELIX (134°C 18 mn)	AVEC LE PREMIER CYCLE




134°C 18 min test Hélix

STEAM

- Tous les matins **avec** le premier cycle d'instruments
- Le test hélix doit être ensaché et placé au centre de la cuve
- Contrôler et valider le papier vireur avant de libérer la charge
- **Traçabilité**

VÉDAS OPHTALMOLOGIE

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable

	<h1>PROTOCOLES</h1> <h2>Les tests de Routine</h2>	Date création 01/03/26
		Date application 01/03/26
		Réf :
		Version : 1.0

Test de routine	Fréquence
Indicateur physico-chimique Classe 6 (Norme ISO 11140-1)	A chaque cycle, dans chaque charge



- Dans chaque cycle
- A l'intérieur d'un sachet
- **Contrôler et valider** le papier vireur avant de **libérer la charge**
- **Traçabilité**

A la fin du cycle et près contrôle retirer le papier vireur du sachet et coller la bandelette sur la fiche de stérilisation en s'assurant que le scotch recouvre la partir colorée

(Inscrire sur la fiche de stérilisation que les indicateurs étaient placés dans un sachet de stérilisation pendant le cycle)

Test de routine	Fréquence
Indicateur de passage	A chaque cycle, dans chaque charge



- Papier vireur sur le sachet
- **Contrôler et valider** le papier vireur avant de **libérer la charge**
- **Traçabilité**